



ひまわり
美浴シリーズ *Viami*


シャワー入浴装置

介助
入浴

お湯につかるから、
お湯に包まれる入浴へ。



ゆったりと、こちよく。

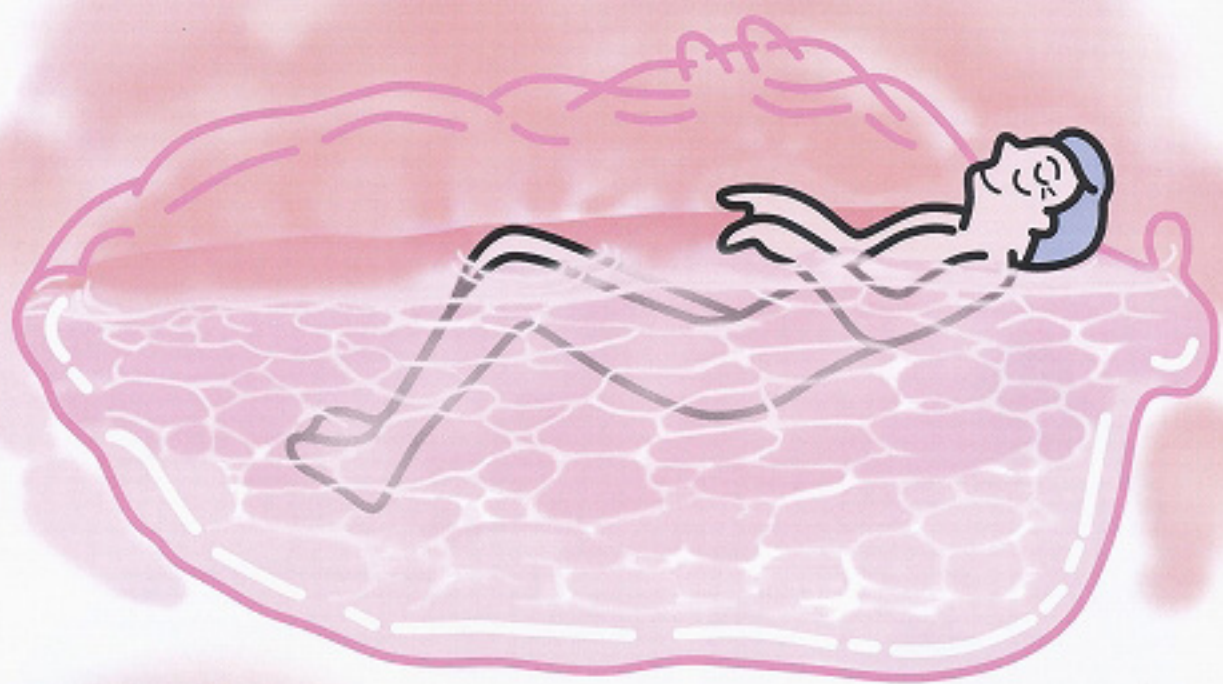

従来のシャワー入浴の概念を超えた“お湯に包まれる感覚”
日本人のお風呂好きを十分に満足させる入浴感です。

P3・4

美浴シリーズの特長



P5・6

幅広い対応が可能なリクライニングタイプ。

RS-06

リクライニング式シャワー入浴装置



P7・8

イスに座って広々入浴。自分でも洗えます。

RS-05

車イス式シャワー入浴装置



P9・10

寝たままの姿勢で、ゆったりくつろぎ入浴。

NS5000

ストレッチャー式シャワー入浴装置



P11・12

省スペースで、気軽に入浴できる簡易タイプ。

RS-11H

シャワー入浴装置



P11・12

コンパクトに収納できる便利な伸縮タイプ。

RS-09

ストレッチャー式シャワー入浴装置



P12

美浴シリーズ専用
ボディーシャンプー・ラバーズ

P13・14

床ずれ防止用品

● ソフケアシリーズ

- ・ソフケア840
- ・ソフケア・ヒールケアブーツ(踵用)
- ・ISOFLEXチェアクッション(イス用)

● エネタンよもぎメディカルシリーズ

- ・よもぎ愛マットレス
- ・チェアマット
- ・床ずれ防止パッド
- ・床ずれ防止マット

P14

よもぎスキンケアシリーズ

P14

衛生用品エアゾルシリーズ

きれいなお湯が全身をやさしく包み込む、
それは、はじめての穏やかな心地よさ。

美浴シリーズは、密封されたドーム内にシャワー
を噴出させる入浴装置です。9～16個のノズルを
内部に配備し、独自に開発した霧のように細か
い約300ミクロンの温水微粒子が、全身をくま
なく洗浄。3～5分程度の入浴で身体全体をボ
カボカに温め、快適な入浴が楽しめます。




美浴シリーズの特長

1 湯冷めしにくい、優れた温熱効果


サウナ効果によって全身がすばやく温められ、2～3分程度で発汗作用が始まります。温められてすみ
ずみまで振がった毛細血管を通り、温かい血液が全身に循環。新陳代謝も促します。身体全体がムラ
なく温まるため湯冷めをしにくく、短時間の入浴で室温に影響されず十分に温かさが持続します。

体表面温度のサーモグラフィ比較

○ 微粒子シャワー の場合

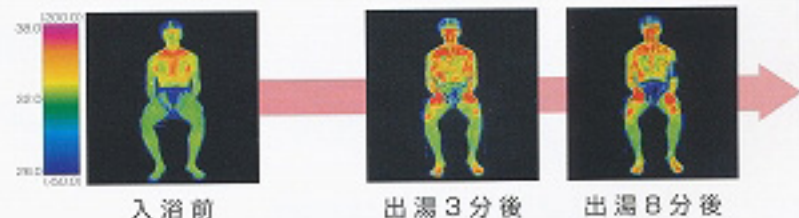

○ 貯湯式入浴 の場合

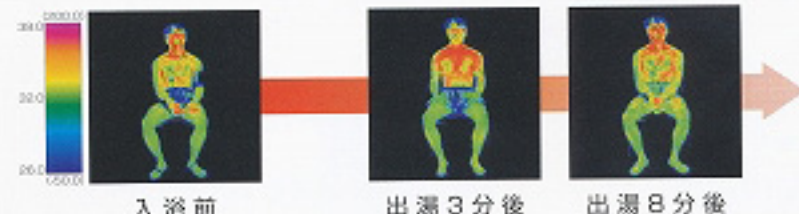

※サーモレーザTH3102MR (NEC三栄) による40℃湯温での計測データです。

微粒子シャワーと貯湯式にそれぞれ5分間入浴して3分後及び8分後の体表面温度を計測。赤い部分ほど体温が高いことを示しています。

2 心臓や身体への負担が少なく、穏やかな入浴感

貯湯式の全身浴のような静水圧がかからないため、心臓や身体への負担が極めて少なく、疲れず
安全に入浴できます。また、こちよい微粒子シャワーは肌にもやさしく、心身共にリラックス
効果が期待でき、心地よい入浴が楽しめます。

バスルームに満ちる、くつろぎと安らぎ、
だれにも快適な入浴環境を実現します。

■入浴者に、快適・清潔・安全

快適

全身をくまなく、やさしく洗浄。サウナ効果と
ここちよい微粒子シャワーにより身体の内から
温まり、心身共にリラックスできます。

清潔

つねに新しいお湯を使用するので衛生的。入浴者間の交差感染を防ぎやすく、失禁等の
汚れも簡単に洗浄できます。

安全


急激な温度変化、水圧変化を抑えた構造により安全に入浴していただけます。
高温になると自動的に湯水を遮断する安全設計です。

普通のシャワー



粒子が大きく皮膚表面を
すぐに流れ落ちる。

3003アルミニウム微粒子シャワー

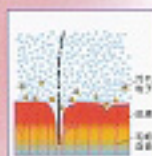

粒子が小さく汚れを
落としやすい。

■介助者に、快適・負担軽減・安心

快適

浴室内に湯気や熱気がこもりにくく湯水の飛散も少ないため、つねに快適な作業環境を
保ちます。

負担軽減

操作はシンプルで簡単、入浴介助の作業効率が向上し、一人当たりの入浴時間も短縮
できるため、大勢の入浴者にも対応できます。

安心

入浴者がうっかり顔を湯に浸けて溺れることがありません。また、本体には電気を
一切配線せず、漏電による事故を防ぎます。

■施設運営者に、省コスト・省スペース・省メンテナンス

省コスト

付帯投資が少なく、少ない予算で設置できます。人件費やその他のランニングコスト
(上下水・電気・ガス)も節約でき、とても経済的です。

省スペース

軽量・コンパクト設計のため、導入に手間や場所をとらず、簡単に設置できます。
浴室内のスペースも有効活用できます。

省メンテ ナンス

消毒液噴射機能付きで、きめ細やかな衛生管理が可能です。本体内部は汚れの付きにく
い仕上げで、清掃も簡単に行えます。

リクライニングチェアに座り、リラックスして入浴できる「RS-06」。
外装は、見た目にもやさしく安全なラウンドデザインを採用しました。
全身洗浄をしながら、ハンドシャワーを使って同時に洗髪もできるため、
作業効率がぐんとアップ。介助者もイスに座り、
楽な姿勢で入浴介助を行うことができます。



RS-06

リクライニング式シャワー入浴装置

幅広い対応が可能な
リクライニングタイプ。

■ 付属品



ミキシングボックス
水とお湯を設定温度に調節し、
本体に送り込む装置です。

■ RS-06 の特長



移乗が楽な リクライニングチェア

座位保持が困難でも、
楽な姿勢で入浴
できます。



オプションで、 専用ストレッチャーを 装填可能

リクライニングチェアと
併用し、介護度に応じた
幅広い対応が可能です。



介護・観察窓で プライバシーに配慮

入浴者の状態を
確かめながら、入浴
介助できます。




入浴しながら、 同時に洗髪も


全身洗浄しながら
洗髪すれば
作業効率がアップ。

■ 外寸・設置図面


□ 本体外形寸法図

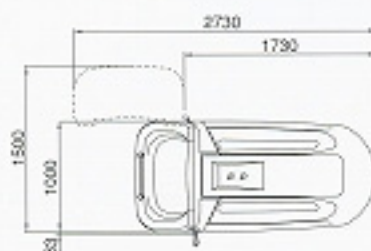

□ リクライニングチェア寸法図

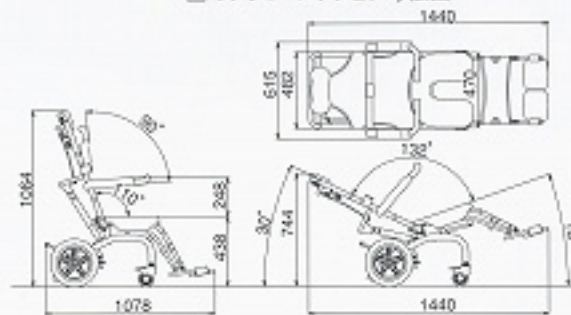

□ 標準配置図

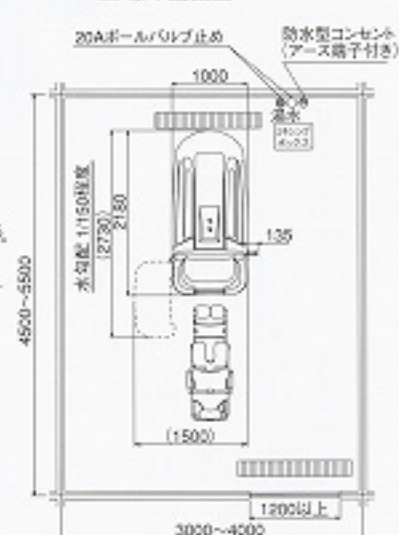

□ RS-06専用ストレッチャー寸法図



単位：mm

設備条件

- 給湯／給水配管 20Aボールバルブ止め〔参考FL+約800mm 壁出し下向き〕 □ 給湯／給水圧 0.1～1.0MPa(要減圧弁)
- 給湯温度 55℃±5℃定温供給 □ 電源AC100V 15A 50/60Hz 防水型コンセント(アース端子付)〔参考 FL+約1000mm〕
- 専用漏電遮断器を設けて下さい。 □ 浴室内に暖房／換気扇の設置を推奨します。



「RS-05」は、座ることができる方のためのシャワー装置です。
頭を起こしたままの姿勢なので、視野が広く、安心して入浴できます。
本体内は障害物もなく、とても広々としています。
全身洗浄に加え、入浴者が自分で部分洗いをすることもできます。
介助者は、湯温調節やハンドシャワーで洗髪をするだけの簡単介護です。



RS-05

車イス式シャワー入浴装置

イスに座って広々入浴。
自分でも洗えます。

■ 付属品



ミキシングボックス
水とお湯を規定温度に調節し、
本体に送り込む装置です。

■RS-05の特長



座位調整ができる 専用車イス

ペダルにより、
20cm内での高さ
調整が可能です。



広々としたドーム状の 内部スペース

さまざまな体型の方の
入浴を可能にする
構造です。



ハンドシャワーで、 同時に洗髪

全身洗浄しながら
洗髪すれば、
作業効率がアップ。




作業スペースを 設けた親切設計


ドアに、介助者の
ための作業スペースを
設けました。

■外寸・設置図面


□ 本体外形寸法図

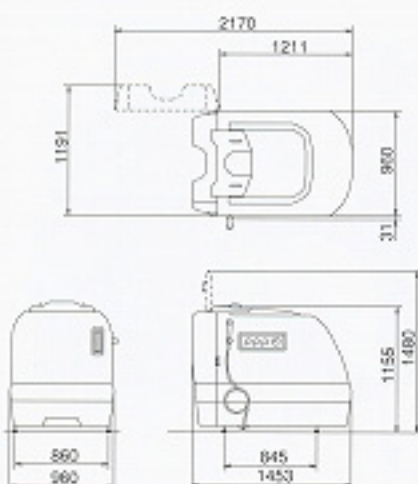

□ フリーチェア寸法図

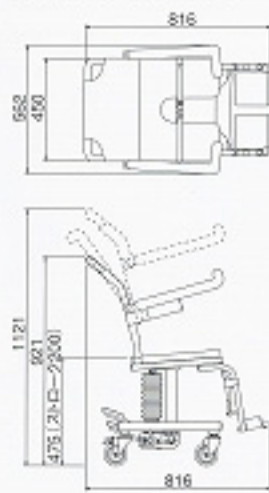

□ 標準配置図

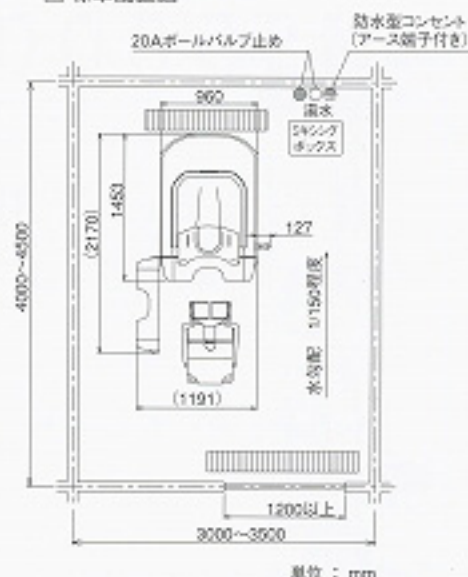

設備条件

- 給湯/給水配管 20Aボールバルブ止め [参考 FL+約800mm 壁出し下向き]
- 給湯/給水圧 0.1~1.0MPa (要減圧弁)
- 給湯温度 55℃±5℃ 定温供給
- 電源AC100V 15A 50/60Hz 防水型コンセント (アース端子付) [参考 FL+約1000mm]
- 専用漏電遮断器を設けて下さい。
- 浴室内に暖房/換気扇の設置を推奨します。

電動昇降ストレッチャーを利用して、寝たまの姿勢で入浴できます。

「NS5000」は、“プライバシー保護”と“ふれあい”をコンセプトにしたシャワー入浴装置です。ドーム両側の大きな介護窓からムリのない姿勢で入浴者を洗えます。

ハンドシャワーで補助洗浄もでき、よりきめ細やかな介護をしていただけます。



NS5000A ストレッチャー式入浴装置

電動タイプよりコストパフォーマンスに優れた、足踏昇降ストレッチャータイプ。

NS5000

ストレッチャー式シャワー入浴装置

寝たまの姿勢で、
ゆったりくつろぎ入浴。



※ストレッチャーのアンダートレイはオプションとなります。

■ 付属品



コントロールボックス

水とお湯を設定温度に調節し、本体に送り込む装置です。

■ 消耗品



ソフトマット(大)

肌触りがやさしく柔らかな、安心素材の全身用マットです。



ソフトマット2

肌触りがやさしく柔らかな、安心素材の背中用マットです。

■ NS5000の特長



便利な電動昇降 ストレッチャー

ロータイプの車イスからも、
楽に移乗できます。



中洗いしやすい 大きな介護窓

入浴者の体調の変化を
見ながら、ムリのない
姿勢で身体を洗えます。



作業性がアップする アーチ型脚部

腰を曲げて介護
しても、膝が本体に
当たりません。




きめ細やかな 温度調節が可能


37～43℃の間で、1℃
単位で湯温を設定
できます。

■ 外寸・設置図面


□ 本体外形寸法図

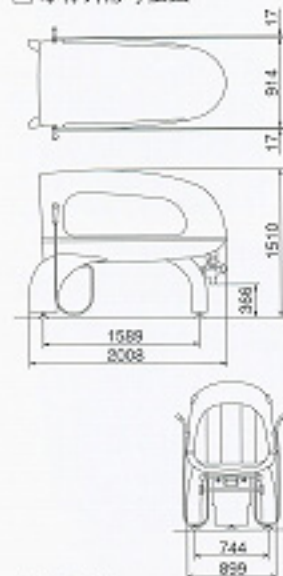


□ 電動昇降式ストレッチャー寸法図

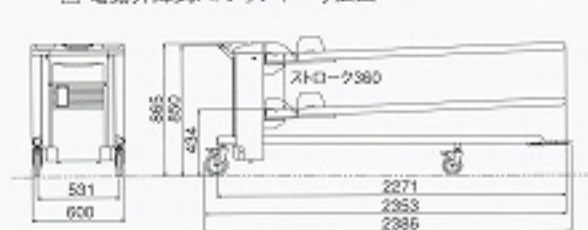

□ 足踏昇降式ストレッチャー寸法図

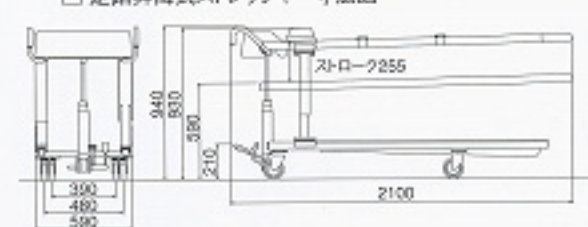

□ 標準配置図

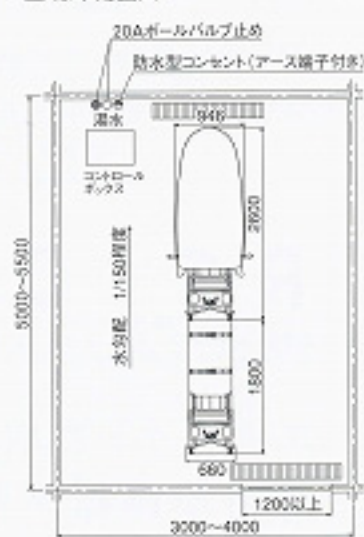

単位: mm

設備条件

□ 給湯/給水配管 20Aボールバルブ止め[参考 FL+約800mm 壁出し下向き] □ 給湯圧 0.1~1.0MPa(要減圧弁) 給水圧 0.1~1.0MPa(要減圧弁) □ 給湯温度 55℃±5℃定温供給 □ 電源AC100V 15A 50/60Hz 防水型コンセント(アース端子付) [参考 FL+約1000mm] □ 専用漏電遮断器を設けて下さい。□ 浴室内に暖房/換気扇の設置を推奨します。
□ ストレッチャー内蔵バッテリーに充電するためのコンセント(AC100V 15A 50/60Hz)を浴室外(浴室入口付近)に設けて下さい。



キャスター付の「RS-11H」なら、気軽に入浴できます。
介護窓から身体洗浄、ハンドシャワーを使って洗髪が可能。
浴室内での移動も可能で、浴室スペースを有効に
利用できます。

RS-11H

シャワー入浴装置

省スペースで、気軽に
入浴できる簡易タイプ。



「RS-09」なら、寝たままの姿勢で入浴できます。
ストレッチャーを挿入するのではなく、本体ドームを伸縮させて
覆うため、振動も不安感ありません。
体調に合わせて下半身浴なども可能です。



RS-09

ストレッチャー式シャワー入浴装置

コンパクトに収納でき
便利な伸縮タイプ。

